

Désinfection rapide Includal® Wipes



Description du produit

Lingettes alcoolisées pour la désinfection rapide

Propriétés du produit

- lingettes douces imprégnées du désinfectant INCLUDAL® ANTISEPT
- virucide limité PLUS selon la recommandation du RKI (y compris les virus Corona, Influenza et Vaccinia ainsi que BVDV, VHB, VIH, VHC)
- bactéricide (y compris SARM), tuberculocide
- levuricide
- sans parfum
- conforme à la norme HACCP (liquide d'imprégnation)

Efficacité et méthodes de vérification

Bactéries et levures	Méthode	Charge	Temps d'action
Recommandation d'utilisation pour la désinfection des surfaces : Bactéricide, levuricide	VAH/EN 16615	avec de la mécanique, charge haute	5 minutes
Mycobactéricide (M.avium et M.terrae)	EN 14348	charge basse	1 minute
Tuberculocide (M.terrae)	EN 14348	charge basse	30 secondes

Virus	Méthode	Charge	Temps d'action
Virucide limité	RKI/DVV	incl. HBV/HIV/HCV	30 secondes
Virucide limité PLUS	RKI/DVV	incl. HBV/HIqV/HCV	3 minutes
Efficace contre les rotavirus	EN 14476	charge basse	30 secondes
Effectif contre les adénovirus	EN 14476	charge basse	3 minutes
Effectif contre les norovirus (NVM)	EN 14476	charge basse	1 minute

Domaine d'application

Les INCLUDAL® WIPES sont des lingettes douces imprégnées du désinfectant INCLUDAL® ANTI-SEPT. Les lingettes INCLUDAL® WIPES conviennent au nettoyage antimicrobien des mains ainsi qu'à la désinfection et au nettoyage de tous les types de surfaces résistantes à l'alcool. En raison de leur formulation sans parfum et sans résidus, elles conviennent également à l'industrie alimentaire et aux cuisines.

INCLUDAL® WIPES conviennent par exemple à la désinfection des sièges de toilettes, des poignées de porte, des combinés téléphoniques et des caissiers. Le liquide d'imprégnation est conforme à la norme HACCP.

Spectre d'action

INCLUDAL® WIPES ont un effet bactéricide (y compris SARM), tuberculocide, levuricide, virucide limité PLUS selon RKI/DVV (y compris les virus Corona, Influenza et Vaccinia ainsi que BVDV, VHB, VIH, VHC).

Mode d'emploi

Essuyer complètement ou mouiller suffisamment les surfaces et objets résistants à l'alcool avec INCLUDAL® WIPES. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcool, par exemple le verre acrylique. Ne pas jeter dans les toilettes. Réservés à un usage professionnel.

Description du liquide d'imprégnation

INCLUDAL® ANTISEPT

Solution alcoolique (env. 45 %) claire, incolore, sans aldéhyde et sans parfum.

Composition du liquide d'imprégnation

INCLUDAL® ANTISEPT

100 g de solution contiennent 45,0 g d'éthanol.

Instructions de manipulation

Ouvrir la recharge. Former un rouleau de la recharge ouverte. Laisser la recharge de lingettes glisser directement dans la boîte. Tirer la première lingette du milieu du rouleau au travers de l'ouverture du couvercle de la boîte et remettre le couvercle sur la boîte. Veuillez remplir la boîte exclusivement avec une recharge originale d'INCLUDAL® WIPES Refill!

Types de produits

PT01 – Désinfection de la peau saine et intacte
 PT02 – Désinfection des surfaces et des matériaux qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux
 PT04 – Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage

INCLUDAL® WIPES sont stockables à température ambiante dans des conteneurs en emballage d'origine. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. La conservabilité après ouverture de la recharge est de 28 jours, à condition que la boîte soit soigneusement refermée après chaque utilisation.

Prescriptions légales

INCLUDAL® WIPES est un produit biocide selon la Directive sur les Biocides (EU) Nr. 528/2012.

UFI: SK00-V0H9-000E-P5FT

DE: N° d'enregistrement BAuA : N-52790, N-52791 et N-84660

FR: N°Inventaire: 72900 ;

NO: N° d'enregistrement: 638130

Une Fiche de Données de Sécurité pour le liquide d'imprégnation INCLUDAL® ANTISEPT selon la

directive de la CE est disponible et peut être téléchargée sous www.myxal.de.

Etiquetage selon les directives de l'UE

Attention : Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans une entreprise de collecte agréée.

Données de commande d'INCLUDAL® WIPES

INCLUDAL WIPES REFILL
RECHARGE DE 120 LINGETTES
(12 x 17,5 cm)
N° Article: 13887001
12 x recharge de 120 lingettes = 1 UE¹⁾

INCLUDAL WIPES BOITE
AVEC 120 LINGETTES
(12 x 17,5 cm)
N° Article: 14306001
12 x boîte avec 120 lingettes = 1 UE¹⁾

¹⁾ UE = Unité d'emballage

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l'état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Version: 01/2026

Peter Greven Physioderm GmbH | Procter-&-Gamble-Straße 26 | 53881 Euskirchen | Allemagne
Tél: +49 (0)2251 77617-30 | info@pgp-skincare.com | www.myxal.de



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.